


Fiche technique
Utilisation du dispositif de transfert type Multi-Ad®
Pour le remplissage du diffuseur portable
Complément du guide de préparation pour diffuseur portable en
extemporané







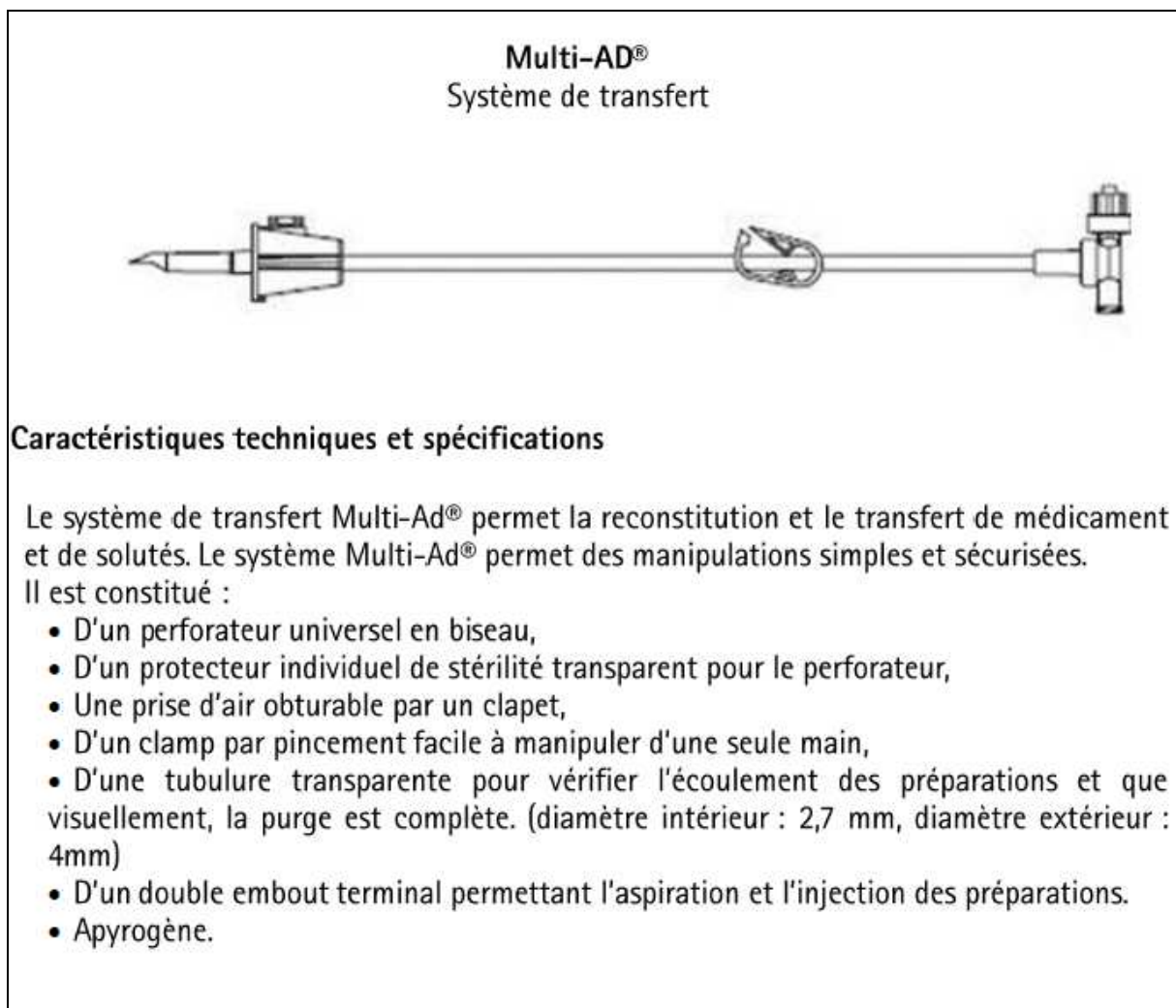

Ce dispositif est proposé pour le remplissage des diffuseurs portables d'un volume supérieur à 100ml

Descriptif du dispositif de transfert Multiad®



Remplissage du diffuseur portable avec le dispositif

Rappel : Désinfection préalable des mains avec un PHA (cf. guide de prépa du diffuseur)

<p>1. Préparer les éléments du montage</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Poche de sérum - Tubulure de transfert Multi-Ad® - Seringue de 50ml - Compresse stérile+ antiseptique alcoolique - Diffuseur portable 	
<p>2. Connecter et purger le dispositif de transfert en utilisant une compresse stérile avec antiseptique alcoolique</p>	 <p style="text-align: center;">Introduire le perforateur dans la poche de sérum</p>	 <p style="text-align: center;">Exercer une pression sur la poche Pour chasser l'air et purger la tubulure</p>
<p>3. Connecter la seringue de 50ml sur le double embout terminal, puis connecter le diffuseur</p>	 <p style="text-align: center;">Terminer la purge de la tubulure à l'aide de la seringue en vérifiant l'absence d'air</p>	 <p style="text-align: center;">Connecter l'embout du diffuseur en regard de la seringue</p>
<p>4. Remplir la seringue</p>	 <p style="text-align: center;">Aspirer le liquide de la poche dans la seringue</p>	 <p style="text-align: center;">Présentation du montage le sérum peut être injecté dans le diffuseur</p>
<p>5. Injecter le sérum dans le diffuseur portable</p>	 <p style="text-align: center;">Injecter le sérum</p>	<p style="text-align: center;">Précautions pour l'injection des antibiotiques :</p> <p style="text-align: center;">Désadapter la seringue avec une compresse avec antiseptique alcoolique, en maintenant l'embout terminal pour éviter la déconnexion du diffuseur avec le système</p>
<p>Renouveler les opérations 4 et 5 autant de fois que nécessaire jusqu'au remplissage du diffuseur avec dilution prescrite</p>		